



VITAMINA C

Instrucciones:

1. Extraer una muestra de suero de manera habitual. (No usar tubo con gel)
2. Centrifugar y separar el suero
3. Desproteinizar inmediatamente el suero:
El laboratorio le provee 2 viales con 200ul de ácido perclórico al 10%
Agregar 200ul de suero en cada uno de los dos viales eppendorf suministrados.
Debe enviarse 2 viales de suero desproteinizado por muestra de paciente.
4. Agitar vigorosamente y dejar en heladera 20 minutos.
5. Congelar los viales a -20°C (sin centrifugar y sin separar el sobrenadante) y protegerlos de la luz.
6. Remitir ambos viales INMEDIATAMENTE al Laboratorio.

El laboratorio está para asesorarlo, ante cualquier duda, no vacile en consultar las veces que considere necesario.